

IMPIEGO DEL CRIOSTATO

Destinatari Tecnici di laboratorio del servizio di Anatomia Patologica.

X CRIOSTATO

Apparecchio per tagliare materiale biologico congelato e non fissato, proveniente dalle camere operative.

1. Gli operatori che utilizzano il CRIOSTATO, devono indossare gli indumenti di protezione, guanti monouso sopra e sotto i guanti antitaglio.
2. Tutti gli accessori che si utilizzano all'interno della camera del criostato non possono essere utilizzati per altri scopi.
3. Non toccare nulla di cui non sia prevista la disinfezione al termine delle operazioni di taglio.

X CONCLUSE LE OPERAZIONI DI TAGLIO

1. Allontanare la lama prima di accedere alla camera di congelamento per le manovre di pulizia.
2. Disinfettare la lama prima di riporla nella propria custodia.
3. Riporre tutto ciò che si utilizza all'interno della camera di congelamento in un contenitore con idoneo mezzo disinfettante.
4. Provvedere alla pulizia e disinfezione delle parti esterne utilizzate durante le operazioni di taglio (rotante contropesata, manopola regolazione della temperatura, tasti di comando delle operazioni di congelamento).