

NORME DI SICUREZZA NELL'IMPIEGO DELL'APPARECCHIATURA ETD PER LA PULIZIA DEI FIBROSCOPI OLYMPUS

Destinatari Personale operante nei servizi di Endoscopia.

X NORME DI CAUTELE PER MANIPOLAZIONE DEI CONTENITORI DEL DETERGENTE E DEL DISINFETTANTE

(ETD - ENDO THERMO DISINFECTOR, apparecchiatura per la disinfezione termochimica dei Fibroscopi- Endoscopi.)

Gli operatori prima di iniziare qualsiasi manovra di preparazione all'uso della apparecchiatura, DEVONO:

1. Indossare gli indumenti di protezione (divisa da lavoro), doppio guanti di tipo monouso, occhiali protettivi.
2. Maneggiare con cautela i contenitori del detergente e del disinfettante (colore bianco e blu), evitando di inalare il prodotto.
3. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi; qualora ciò avvenisse, lavare con acqua corrente la parte interessata.
4. I contenitori del detergente e del disinfettante hanno il volume di 5 litri e contengono 4 litri di soluzione, NON si deve travasare il detergente e/o il disinfettante da un contenitore all'altro al fine di evitare di avere un quantitativo, nel contenitore, superiore a 4 litri.
5. Il Disinfettante contenuto nel contenitore blu, è CORROSIVO.

X MANUTENZIONE A CURA DELL'UTILIZZATORE

I controlli riportati alla pagina 14 del Manuale di Istruzioni "ETD ENDO THERMO DISINFECTOR" della OLYMPUS EUROPE devono essere eseguiti a intervalli regolari a seconda della frequenza d'uso della apparecchiatura, la data di sostituzione dei filtri deve essere registrata su apposito registro.

X MALFUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

In caso di malfunzionamento della apparecchiatura si accende la spia luminosa rossa ed entra in funzione il segnalatore acustico.

In tal caso, prima di procedere allo SVUOTAMENTO della camera di lavaggio, ed è NECESSARIO eliminare i detersivi residui seguendo la seguente procedura.

1. Posizionare il selettore del programma sulla posizione "O"
2. Successivamente posizionare il selettore del programma su "disinfezione".
3. Tale procedura disattiverà anche il sistema d'allarme

X SVUOTAMENTO

Subito dopo l'eliminazione dei detergenti residui, la camera di lavaggio è MOLTO CALDA e sprigionerà vapori.

X CAUTELE PER L'APERTURA DELLO SPORTELLO E SUCCESSIVO SVUOTAMENTO DELLA CAMERA DI LAVAGGIO

Prima di aprire lo sportello dell'ETD, indossare i dispositivi di protezione individuali, (D.P.I.) mascherina, doppio guanto di tipo monouso, occhiali protettivi;

APRIRE CON CAUTELA LO SPORTELLO DELL'ETD, rimanendo a debita distanza con il volto al fine di evitare di inalare i vapori presenti nell'unità di lavaggio.

EVITARE il contatto degli occhi e della pelle con l'eventuale umidità residua.

In caso di contaminazione lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata.

IMPORTANTE:

- NON eseguire l'essiccazione se si verifica una interruzione del programma, infatti prima di utilizzare l'essiccatore si DEVE portare a termine il PROGRAMMA DI DISINFEZIONE.

X SVERSAMENTO DEI PRODOTTI

Prima di procedere alla decontaminazione delle superfici, indossare i dispositivi di protezione individuali, (D.P.I.) mascherina, doppio guanti di tipo monouso, occhiali protettivi.

1. Assorbire i liquidi (detergenti, disinfettanti) con materiale inerte (es. segatura)
2. Lavare le zone contaminate con abbondante acqua.