

NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE PER RADARTERAPIA

Destinatari Personale sanitario e tecnico addetto.

X NORME GENERALI

Le apparecchiature possono essere utilizzate solo da personale qualificato e autorizzato.

Le apparecchiature devono mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. Segnalatore di funzionamento presente.
2. Disponibilità di manuali con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

X CARATTERISTICHE DELL'AREA DI IMPIEGO

- **II** cartello affisso sulla porta di accesso all'area di trattamento, indicante pericolo di radiazioni non ionizzanti e accesso consentito solo al personale autorizzato durante il funzionamento, deve rimanere ben visibile nel tempo.
- Durante il trattamento l'accesso e la sosta sono permessi solo al personale strettamente indispensabile.
- Qualora non necessario per la sorveglianza del paziente, il personale non deve sostare nella zona di trattamento.
- Verificare che la luce di segnalazione di apparecchiatura in funzione sia regolarmente accesa durante il trattamento.
- Mantenere periodicamente l'apparecchiatura.

X PROTEZIONE DEI PAZIENTI:

- Al termine del periodo prefissato di trattamento, l'emissione del campo magnetico si deve interrompere automaticamente, pertanto verificare periodicamente il suo corretto funzionamento.