

NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE A ULTRASUONI

Destinatari Personale medico, sanitario e tecnico addetto.

X NORME GENERALI

Le apparecchiature possono essere utilizzate solo da personale qualificato e autorizzato.

L'impiego delle apparecchiature, nel rispetto delle norme sotto riportate, comporta rischi estremamente contenuti per gli utilizzatori, tanto che può essere consentito, in linea generale, anche a operatrici in stato di gravidanza.

Le apparecchiature devono mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di sicurezza:

- Segnalatore di funzionamento presente.
- Disponibilità di manuali con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

X NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO

- Utilizzare l'apparecchio secondo le modalità indicate nel manuale;
- Non porre a contatto con la propria cute la sonda emittente ultrasuoni e in particolare se spalmata col gel perché favorisce la trasmissione degli ultrasuoni.
- Verificare che i collegamenti elettrici dell'apparecchiatura siano sempre efficienti e appaiano in buono stato. In presenza di spine in parte staccate o cavi di collegamento deteriorati occorre sospendere l'impiego dell'ecografo e richiedere immediatamente un intervento di manutenzione.
- Segnalare immediatamente ogni malfunzionamento della macchina al proprio Responsabile, che dovrà provvedere a richiedere l'intervento necessario.
- Effettuare gli eventuali spostamenti dell'apparecchiatura (dell'ecografo in particolare) solo dopo averla sconnesso dall'alimentazione elettrica e aver avvolto i cavi, in modo da impedire il danneggiamento degli stessi da parte delle ruote o da componenti la macchina;

X PROTEZIONE DEI PAZIENTI

- Al termine del periodo prefissato di trattamento, l'emissione radiante si deve interrompere automaticamente, pertanto è opportuno verificare periodicamente il suo corretto funzionamento.